

Nuova  
energia vitale  
per il corpo,  
trasformalo  
con la potenza  
delle sinergie  
bioquantiche.



**mya 6.0**  
Sinergie Bioquantiche

ADVANCED TECHNOLOGY,  
UNLIMITED POSSIBILITIES.

  
C E S A R E  
Q U A R A N T A

  
TECNOLOGIA  
D'ECCELLENZA  
MADE IN ITALY



  
C E S A R E  
Q U A R A N T A

# mya 6.0

Sinergie Bioquantiche

## 6 tecnologie per risultati 6 volte più efficaci

MYA 6.0 è l'ultimo dispositivo total body hand free firmato Cesare Quaranta Srl ed è l'unica tecnologia sul mercato a raggiungere risultati reali di altissimo livello. Grazie all'azione di sei tecnologie che lavorano sinergicamente, esaudisce in maniera naturale i desideri estetici di bellezza e di benessere dei clienti contrastando rapidamente ed efficacemente gli inestetismi di viso e corpo.

I processi di bio-vitalizzazione e bio-rigenerazione delle cellule e dei tessuti sono dovuti all'effetto dal laser LLLT che lavora per massimizzare gli effetti delle altre tecnologie.

MYA 6.0, infatti, vanta su un unico supporto le 6 migliori tecnologie estetiche:

- ELETTRICITÀ
- ULTRASUONI
- LASER LLLT
- BIA
- ELETTROPORAZIONE
- FOTOBIMODULAZIONE

# Elementi che fanno la differenza

## SPERIMENTA IL NUOVO METODO MYA 6.0 SINERGIE BIOQUANTICHE

Forti della nostra esperienza nello studio e nella produzione di piastre ad ultrasuoni ed elettrostimolazione - di cui deteniamo il brevetto - abbiamo integrato sulle stesse piastre la tecnologia laser LLLT per enfatizzare e massimizzare i benefici e i risultati ottenuti. LASER LLLT - LOW LEVEL LASER THERAPY è il principio utilizzato dalle tecnologie laser LLLT che lavorano in profondità a una lunghezza d'onda di 650 nm o 780 nm, direttamente sull'ipoderma e sull'adipe. L'energia bioquantica stimola una cascata di reazioni che amplificano e incrementano gli effetti dell'energia erogata sui tessuti, contrastando efficacemente gli inestetismi con risultati mai visti prima.

## ULTRASUONO E LASER LLLT LA SINERGIA PERFETTA PER RISULTATI 6 VOLTE PIÙ EVIDENTI

Ultrasuoni e laser LLLT lavorano in sinergia per enfatizzare il lavoro promosso dall'elettrostimolazione sul tessuto target a seconda del programma scelto. Massimizzazione ed esaltazione dei risultati fino 6 volte di più in un unico trattamento. la potente azione della tecnologia laser LLLT sull'adipe contribuisce al dimagrimento importante garantendo il recupero della tonicità tissutale attraverso la stimolazione del collagene.

## LE PIASTRE - TOTALMENTE RIDISEGNATE

OVALI ED ERGONOMICHE: nuova forma ultra-ergonomica, perfetta per l'assorbimento degli urti

PIÙ GRANDI: per massimizzare l'area di contatto e azione

NUOVI COLORI: il bianco e il blu per uno stile elegante e innovativo

OTTIMIZZATE PER LA RIFLESSIONE DEL LASER LLLT: garantiscono la totale sicurezza dell'operatore e del cliente.

+ LASER LLLT

+ ELETTROSTIMOLAZIONE

+ ULTRASUONO AD ALTA FREQUENZA





mva60



4

4

3

3

2

2

1


1

## 6 BENEFICI 6.0 PER MODELLARE TOTALMENTE IL CORPO

1. RIMODELLAMENTO
2. DIMAGRIMENTO
3. DRENAGGIO
4. TONIFICAZIONE MUSCOLARE
5. TONIFICAZIONE TISSUTALE
6. TRATTAMENTO DEGLI INESTETISMI DELLA CELLULITE

Contemporaneamente sulla stessa piastra per trattare:


- L'ADIPE LOCALIZZATO;
- GLI INESTETISMI DELLA CELLULITE;
- L'ATONIA MUSCOLARE;
- LA STASI LINFATICA;
- IL BENESSERE TOTALE DELL'INDIVIDUO

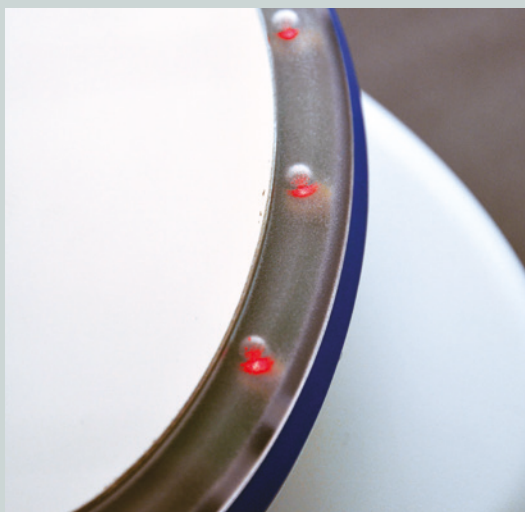

### PROTOCOLLO PERSONALIZZATO DI REMISE EN FORME 15 TRATTAMENTI.

La cliente **ha perso 6 cm nella zona addominale.**

La silhouette risulta più snella e tonica.

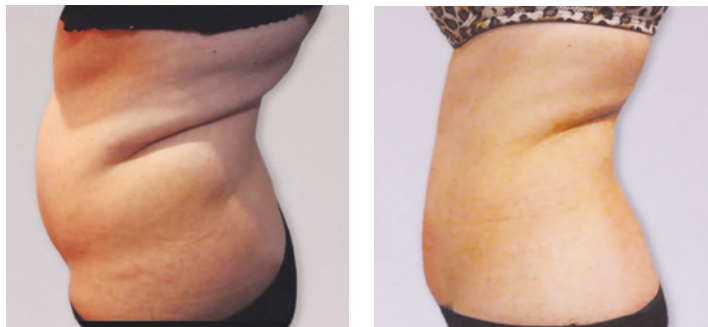

### PROTOCOLLO PERSONALIZZATO DI REMISE EN FORME 12 TRATTAMENTI.

Evidente riduzione dell'ineestetismo della cellulite edematosa e fibrosa sulle cosce



# Un nuovo e unico metodo per risultati mai visti prima

## CASO STUDIO 1

### QUADRO CLINICO ESTETICO INIZIALE

- + inestetismo della cellulite fibrosa;
- + adiposità localizzata limitata fianchi, glutei, sottoglutei e coulottes
- + lieve presenza dell'inestetismo della cellulite molle nell'interno coscia

### MISURAZIONI ANTROPOMETRICHE

12 trattamenti con frequenza 2 volte alla settimana

Periodo temporale totale: circa 2 mesi

	Pre-trattamento	6 Trattamenti	12 Trattamenti
FIANCHI	103 cm	100 cm	96 cm
COSCIA	65 cm	63 cm	60 cm

PESO: 58 Kg INVARIATO

Sostituzione massa grassa con massa magra

### QUADRO CLINICO ESTETICO FINALE

- + risoluzione quasi totale delle aderenze dovute all'inestetismo della cellulite fibrosa;
- + evidente perdita di centimetri ai fianchi e alle coulottes
- + notevole aumento di tono muscolare;
- + scomparsa dell'inestetismo della cellulite molle nell'interno coscia.



## CASO STUDIO 2

### QUADRO CLINICO ESTETICO INIZIALE

+ importante adiposità localizzata su addome;  
+ presenza dell'inestetismo della cellulite edematosa e fibrosa

### MISURAZIONI ANTROPOMETRICHE

15 trattamenti con frequenza 2 volte alla settimana

PESO DA 63 Kg A 60 Kg

	Pre-trattamento	15 Trattamenti
<b>VITA</b>	97 cm	88 cm
<b>ADDOME</b>	112 cm	103 cm
<b>COSCIA</b>	60 cm	57 cm

### QUADRO CLINICO ESTETICO FINALE

+ notevole riduzione delle adiposità localizzate sull'addome;  
+ evidente riduzione dell'inestetismo della cellulite edematosa e fibrosa



# Sinergie Bioquantiche 6 tecnologie 6.0

LA SINERGIA DI 6 TECNOLOGIE  
PER BENEFICI BIOQUANTICI  
CON RISULTATI MAI VISTI PRIMA

## 01. LASER LLLT

È la sorgente di sinergie bioquantiche MYA 6.0. Su ogni piastra sono installate 6 sorgenti laser LLLT con lunghezza d'onda di 635 nm da 672 mW in duty cycle a emissione intermittente. Fasi di attivazione e fasi di rilassamento vengono intervallate per massimizzare gli effetti. La tecnologia laser LLLT ha la capacità di penetrare la barriera cutanea e indurre risposte fotochimiche nei tessuti trattati, inducendo reazioni metaboliche negli adipociti e inducendo reazioni "a cascata".

## 02. ELETTROSTIMOLAZIONE

L'elettrostimolazione agisce su viso e corpo grazie a impulsi profondi, inducendo un lifting muscolare e cutaneo che migliora l'ossigenazione e la rivitalizzazione dei tessuti, favorendo gli scambi metabolici e l'eliminazione delle tossine. L'emissione controllata di correnti dalle differenti forme d'onda, modulate a frequenza che variano dai 33 Hz ai 5.000 Hz, consente l'esecuzione di protocolli estetici personalizzabili ed efficaci.

## 03. ULTRASUONO

L'ultrasuono agisce combinando un effetto termico e micromeccanico localizzati, grazie ai quali va ad agire sugli inestetismi della cellulite. Oltre al massaggio e alla produzione locale di calore, si ottengono miglioramento della vascolarizzazione e fenomeni di dissociazione molecolare.

## 04. BIA

Il test bioimpedenziometrico valuta la composizione corporea del cliente. Consente di effettuare, grazie all'azione di una corrente sinusoidale a tre frequenze, misurazioni precise e attendibili circa le percentuali di massa magra, massa grassa, liquidi totali, intracellulari ed extracellulari del soggetto. Questa tecnologia consente di misurare la condizione del soggetto prima che si sottoponga al trattamento e di osservarne i miglioramenti durante tutto il ciclo di sedute.

## 05. ELETTROPORAZIONE

L'elettroporazione consente di trattare l'inetetismo distribuendo uniformemente il cosmetico sulla pelle e favorendo il totale assorbimento dei principi attivi in esso disciolti. Il manipolo elettroporatore, inducendo piccole modifiche strutturali reversibili a livello dello strato corneo, migliora la permeabilità dei tessuti.

## 06. FOTOBIMODULAZIONE

La fotobiomodulazione è una metodica che ben si integra nei cicli di benessere e consiste nell'irradiare le zone del corpo con luce di diversa cromia per ottenere un vantaggio estetico. Si abbina ai tradizionali trattamenti estetici per rendere armonioso il risultato finale. L'inetetismo, infatti, viene considerato come una vibrazione disarmonica delle cellule di una determinata zona del corpo che potrà essere riequilibrata sfruttando l'energia e, quindi la vibrazione, di uno o più colori specifici.





# 31 programmi, infinite possibilità

Ricerca e sviluppo sono alla base del nostro valore aziendale. Il nostro team di esperti studia con attenzione e cura i programmi e i protocolli dei dispositivi, tenendo conto sia delle esigenze delle professioniste del settore estetico che quelle delle clienti finali. I programmi MYA 6.0 nascono in seguito a uno studio approfondito sulle sinergie bioquantiche. Il laser LLLT - sorgente di queste sinergie - è stato inserito su tutti i programmi per potenziare il lavoro delle piastrine ed enfatizzare i risultati. Inoltre, il ventaglio dei programmi a disposizione è stato ampliato e si è differenziato nel corso degli anni al fine di garantire una copertura totale di azione sugli inestetismi del corpo:

- 2 programmi per elettrostimolazione con elettrodi viso
- 11 programmi per elettrostimolazione con elettrodi corpo
- 13 programmi per ultrasuoni/Laser LLLT+ elettrostim sulla stessa piastra corpo
- 1 programma per l'assorbimento dei cosmetici e fotobiomodulazione
- 1 programma per test impedenziometrico
- 1 programma chip card
- 1 programma contatori
- 1 programma regolazioni

Tutti i programmi sono personalizzabili a seconda del soggetto e dell'inestetismo da trattare.





## TRATTA VISO E CORPO NELLO STESSO MOMENTO CON MYA 6.0

In dotazione **LED MASK ANTI-AGE**. Il caschetto per la **fotobiomodulazione** è dotato di **70 fonti LED** rosse indispensabili per **contrastare i segni dell'invecchiamento e del rilassamento cutaneo**. La stimolazione è atermica, indolore e si adatta a qualsiasi fototipo.

- Aumento del turn-over cellulare a livello epidermico;
- Aumento della produzione di collagene da parte dei fibroblasti;
- Miglioramento della trama cutanea;
- Riduzione delle rughe sottili;
- Nuova compattazione dei tessuti;



## UNA RIVOLUZIONE IN MATERIA DI FOTORINGIOVANIMENTO. LA SINERGIA DELLA MASCHERA LED + SIERO AI POLINUCLEOTIDI

Se la pelle del viso si rilassa e appare spenta e le rughe e le macchie cutanee aumentano, tu rispondi agli inestetismi di viso, collo e décolleté con un protocollo ideato per ridare vitalità e bellezza alla pelle. **L'azione di LED-MASK combinata all'efficacia di una maschera cosmetica professionale ai polinucleotidi costituisce una soluzione unica e rivoluzionaria in tema di fotoringiovanimento.** Questa combinazione, perfetta per le esigenze sia del pubblico femminile che maschile, potenzia la reazione cellulare e provoca un'intensa stimolazione tissutale con benefici eccezionali.



mya 60



MYA 60

4

4

3

3

2

# Qualità elettro-medicale certificata



La Cesare Quaranta Srl è un'azienda italiana che progetta e produce tecnologie elettro-medicali.

L'azienda gode di due certificazioni ISO:

## ISO 9001:2015:

Progettazione, produzione, assistenza ed immissione in commercio di dispositivi elettromedicali per dermatologia e medicina estetica.

Progettazione, produzione, assistenza ed immissione in commercio di apparecchiature elettroniche per il settore estetico.

Commercializzazione e vendita di prodotti cosmetici.

## ISO 13485:2016:

è conforme alla norma UNI CEI EN ISO 13485:2021 per i seguenti prodotti/servizi:

Progettazione, produzione, assistenza ed immissione in commercio di dispositivi elettromedicali per dermatologia e medicina estetica.

Ogni dispositivo viene prodotto nei nostri laboratori di Chieri (TO) con strumenti all'avanguardia e grazie ai migliori test di affidabilità.



## CARATTERISTICHE TECNICHE

### ELETTROSTIMOLAZIONE

Stadio di uscita	onda quadra – corrente di Kotz
Frequenza onda quadra	1kHz modulata a 33/66/133/200 Hz
Frequenza onda di Kotz	2500/4000/5000 Hz modulata a 4/6/8/12/50/75/100 Hz
Corrente di uscita (max)	80 mA carico da 500 ohm

### ULTRASUONI

Frequenza ultrasuoni	3 MHz
Densità di potenza	< 2.8 W/cm <sup>2</sup>

### LASER LLLT

Lunghezza onda	650 nm o 780 nm
Potenza max	672 mW

### ASSORBIMENTO COSMETICI E FOTOBIMODULAZIONE

Stadio di uscita	onda quadra
Frequenza onda quadra	1,6 kHz modulata a 300 mHz
Corrente di uscita (rms)	80 mA con carico da 500 ohm
Colori	blue, bianco, giallo-arancione, verde

### BIOIMPEDENZIOMETRIA

Corrente per bia	0,8 mA a 5 kHz, 50 kHz, 100 kHz
Numero canali di uscita	8 canali destri e 8 canali sinistri per ultrasuono, 4 canali destri e 4 canali sinistri per elettrostimolazione regolabili singolarmente per ogni uscita con indicazione di livello analogica e digitale sul display
Selezione dei trattamenti	13 programmi preimpostati per Elettrostimolazione tradizionale 13 programmi preimpostati x Ultrasuoni, Laser LLLT e/o Elettrostimolazione
Tempo di trattamento Totale	Preprogrammato o impostabile, da 5a 60 minuti

Alimentazione	220/250 V. monofase 50/60 Hz
Potenza assorbita	190 VA MAX
Fusibili di rete	2 x 2 A tipo T 5 x 20
Dimensioni	420 x 1330 x 470 mm
Peso	22 kg
Limiti temperatura	da 5° C a 40° C (durante l'uso)
Prodotto	Made in Italy

**NB:** Il Costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche, al fine di migliorare il prodotto, senza preavviso alcuno.

E099R01\_REV.0 DEL 20/12/2023  
Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche, al fine di migliorare il prodotto, senza preavviso alcuno

  
TECNOLOGIA  
D'ECCELLENZA  
MADE IN ITALY



CESARE  
QUARANTA

**CESARE QUARANTA s.r.l - Unipersonale**  
Via Legnanino, 5 - 10023 Chieri (TO) Italy - +39 0119472132  
[www.cesarequaranta.it](http://www.cesarequaranta.it) - e-mail: [info@cesarequaranta.it](mailto:info@cesarequaranta.it)